

سار فوسپت کوئیک پلاس SURFOSEPT QUICK+

اسپری ضد عفونی کننده الکلی سریع الاثر سطوح و تجهیزات پزشکی و دندانپزشکی / آماده مصرف

کاربرد: سار فوسپت کوئیک پلاس یک محلول ضد عفونی کننده آماده مصرف با پایه الکلی برای ضد عفونی سریع سطوح محیطی کوچک و تجهیزات پزشکی که نیاز به ضد عفونی سریع و قوی دارند شامل سطوح در تماس با بیماران مانند تخت بیماران، یونیت های دندانپزشکی سطوح تجهیزات پزشکی و سطوح تجهیزات در کلینیک ها، آزمایشگاه ها، سطوح ابزارهای تشخیص پزشکی فلزی، مانند اتوسکوپ، دسته لارنگوسکوپ و سطوح ایستگاه پرستاری می باشد.

مزایا

- آماده مصرف
- سریع الاثر (موثر فقط در ۳۰ ثانیه)
- بوی ملایم و مطبوع
- فاقد خوردگی
- دارای اثر ضد میکروبی پایدار

شرایط نگهداری

- محلول آتش زا می باشد.
- دور از نور مستقیم و منابع حرارت نگهداری شود.
- از ترکیب محلول با مواد شیمیایی دیگر خودداری شود.
- در ظروف در بسته در شرایط متعارفی نگهداری شود.
- در محیط خشک و دمای ۵+ تا ۳۵+ نگهداری گردد.

دستور مصرف

به روش اسپری مستقیم

محلول آماده مصرف است و نیازی به رقیق سازی ندارد. سطح مورد نظر را از آلودگی های قابل رویت (خون، بزاق و ترشحات بدن و ...) پاک کرده سپس محلول را روی آن اسپری نمایید سپس بوسیله یک دستمال تمیز سطح مورد نظر را دستمال کشی نمایید پس از ۳۰ ثانیه سطح مورد نظر ضد عفونی می گردد.

به روش دستمال کشی

سطح مورد نظر را از آلودگی های قابل رویت (خون، بزاق و ترشحات بدن و ...) پاک کرده سپس محلول سار فوسپت کوئیک پلاس را روی دستمال تمیز اسپری نموده و سطح مورد نظر را دستمال کشی کنید. بعد از ۳۰ ثانیه سطح مورد نظر ضد عفونی می گردد.

توجه: این محصول برای سطوح حساس به الکل مانند سطوح از جنس پلکسی گلاس مناسب نمی باشد.

ترکیبات

ایزوپروپانول، DDAC، اتانول، افزودنی های مجاز و آب دیونیزه

طیف اثر

باکتری ها، قارچ ها، موثر بر روی ویروس های HCV, HBV, HIV, H1N1 در ۳۰ ثانیه و مایکوباکتریوم توبرکلوزیس (TbB) به مدت ۱ دقیقه.

موارد هشدار

- محلول آتش زا می باشد، محلول در ظروف در بسته نگهداری شود.
- محلول با سطوح پلکسی گلاس سازگاری ندارد.
- از تماس با چشم و بلعیدن خودداری شود.
- از اسپری محلول بر روی وسایل الکتریکی و الکترونیکی خودداری شود.
- در صورت بلع تحریک به استفراغ نشود و به پزشک مراجعه گردد.

تاییدیه ها

دارای تاییدیه و ثبت شده در اداره کل نظارت بر دارو و مواد مخدر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران، تست شده مطابق استاندارد EN1275، EN1276

تاریخ انقضا

۲ سال پس از تاریخ تولید و در صورت باز شدن درب ظرف شش ماه

بطری ۵۰۰ میلی لیتری (به همراه پمپ)	بسته بندی
بطری ۷۵۰ میلی لیتری (به همراه پمپ)	
گالن ۴ لیتری	

