

# سارفوسپت اینسترومنت SURFOSEPT INSTRUMENT

## محلول کنسانتره ضد عفونی کننده و پاک کننده سطح متوسط ابزارهای پزشکی و دندانپزشکی

کاربرد: محلول کنسانتره ضد عفونی کننده سطح متوسط با قابلیت پاک کنندگی مناسب برای ابزارهای پزشکی، جراحی، بیهوشی و دندانپزشکی و آزمایشگاهی به روش غوطه‌ورسازی و استفاده از دستگاه اولتراسونیک، فاقد اثر خوردگی.

### مزایا

- ماندگاری ۷ روز در حین مصرف
- دارای عملکرد همزمان ضد عفونی کنندگی و پاک کنندگی
- مناسب برای ابزارهای پزشکی و دندانپزشکی، آزمایشگاهی قابل اتوکلاو
- فاقد بخارات اسیدی محرک سیستم تنفسی
- حاوی مواد ضد خوردگی برای حفاظت ابزارها در برابر خوردگی
- قابل استفاده در دستگاه اولتراسونیک

### دستور مصرف

قبل از مصرف دستکش مناسب بپوشید. محلول سارفوسپت اینسترومنت را در غلظت‌های توصیه شده زیر تهیه نمایید. ابزارها را با توجه به غلظت و زمان تماس در داخل محلول غوطه‌ور و برس کشی نمایید. پس از پایان زمان غوطه‌وری ابزارها را با آب جاری آبکشی نمایید.

در رقت ۲٪ به مدت ۱۵ دقیقه

در رقت ۱٪ به مدت ۳۰ دقیقه

در رقت ۰/۵٪ به مدت ۶۰ دقیقه

### ترکیبات

ترکیب میکروبی کش آمفوتریک، بنزالکونیوم کلراید، دی‌دسیل‌دی‌متیل آمونیوم کلراید، EDTA، آب دیونیزه.

### طیف اثر

باکتری‌های گرم مثبت، گرم منفی، مایکوباکتریوم‌ها، قارچ‌ها، ویروس‌های پوشش‌دار HCV, HBV, HIV, H1N1

### شرایط نگهداری

- از ترکیب محلول با مواد شیمیایی دیگر خودداری شود.
- در ظروف در بسته در شرایط متعارفی نگهداری شود.
- در دمای ۵+ تا ۳۵+ درجه سانتی‌گراد نگهداری شود.

### موارد هشدار

- از تماس با چشم و بلعیدن خودداری شود.
- در صورت تماس با چشم با آب فراوان شسته شود.
- در صورت بلع تحریک به استفراغ نشود و مشورت پزشکی درخواست گردد.

### تائیدیه‌ها

دارای تائیدیه و ثبت شده در اداره کل نظارت بر دارو و مواد مخدر وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، دارای تائیدیه عدم خوردگی از موسسه متالورژی رازی، واحد ارزیابی میکروبی انستیتو رازی، تست شده مطابق استانداردهای اروپایی EN1040

### تاریخ انقضا

در حالت غلیظ و استفاده نشده ۳ سال پس از تولید و در حالت رقیق شده در صورت نگهداری در ظروف دردار و استفاده طبق دستورالعمل تا ۷ روز

بطری ۲۵۰ میلی لیتری	بسته بندی
بطری ۱ لیتری	
گالن ۴ لیتری	

